



Suma[®] Med Alu

Flytande maskindiskmedel för rengöring i spol- och diskdesinfektorer

Produktbeskrivning

Suma Med Alu L10 är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel speciellt utformat för ett brett spektrum av spol- och diskdesinfektorer samt ultraljudsbad.

Produktegenskaper

Suma Med Alu L10 är ett flytande maskindiskmedel speciellt utformat för ett brett spektrum av spol- och diskdesinfektorer. Produkten passar behoven i många laboratorier och medicinska inrättningar. Formuleringen är skonsam mot mjuka metaller såsom aluminium, koppar och silver.

Produktfördelar

- Säker för användning på aluminium och andra mjuka metaller
- Innehåller kraftfull komplexbildare och alkali som tar bort fet och proteinrik smuts
- För användning i medelhårt till hårt vatten
- Koncentrerad formel med låg användningskostnad

Bruksanvisning

Suma Med Alu L10 används normalt i Diverseys automatiska doseringsutrustning. Om förutsättningarna finns kan produkten även användas med integrerade doseringspump. För att säkerställa ett perfekt rengöringsresultat i medelhårt vatten dosera 1,5-3 g/L beroende på lokala förutsättningar.

En dosering av 1,5 g/l förebygger kalkavlagringar av vatten med upp till 80 ppm CaCO₃. Skölj pumpen och systemets transportledningar före första användning för att undvika en möjlig kristallisering p.g.a. blandning med kvarvarande rester av andra produkter.

Teknisk information

Utseende:	Klar ljusgul vätska
pH (1% lösning):	11.0
Densitet (20°C):	1.27

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas i separat säkerhetsdatablad.

Förvara i originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan Suma Med Alu L10 användas på alla vanligt förekommande medicinska instrument som kan rengöras i spol- och diskdesinfektor.

Miljöinformation:

Produkten är miljömärkt med Svanen.

Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
2 x 5 liter	Dunk

L10

