

plum

WipeClean Ethanol and Surfactant Mini

Desinfeksjonsserviett

**CE**
2797

Engangskluter for enkel og rask desinfisering av overflater som tåler alkohol. Klutene både rengjør og desinfiserer samtidig.

Bruksområde

For desinfisering av overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr som tåler alkohol. Utviklet for bruk i helsevesenet.

Produktegenskaper

Engangskluter for enkel og rask overflatedesinfisering. Klutene inneholder riktig mengde desinfeksjon og er klare til bruk. Inneholder 75 % denaturert etanol (denaturert med IPA) og tensid. Dette betyr at at overflaten ikke behøver å rengjøres før desinfisering. Synlig smuss må imidlertid fjernes før bruk. Uparfymert.

CE-merket for bruk på ikke-invasivt medisinsk utstyr.

De myke og behagelige klutene er laget av 40 % viskose og 60 % PET, og er designet for å etterlate væsken på overflaten. Dette gir best mulig desinfeksjonseffekt.

Klutene er pakket i lufttett emballasje med enkel lukking som sikrer at de ikke tørker ut. De er både kryss- og z-brettet, slik at de enkelt kan tas ut av pakken én og én, ferdig brettet og klare til bruk.

Bruksanvisning

Klutene er bruksklare og brukes på synlig rene og tørre overflater. Ta en klut ut av pakken, bearbeid overflaten slik at den holdes fuktig i henhold til kontakttid for optimal effekt. Kastes etter bruk. Lukk alltid emballasjen etter bruk.

Ikke beregnet til håndhygiene. Bruk hansker i henhold til EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN16615	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN16615	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN14348	Mycobactericidal activity	M. terrae M. avium	1 min (dirty)
EN14476	Limited spectrum virucidal activity	Adenovirus M. norovirus	1 min (clean) 5 min (dirty)

Innhold

Aktive stoffer	Effekt
Denaturert etanol 75 %	Aktive stoffer

Oppbevaring

Oppbevares tørt, frostfritt og ikke i direkte sollys.
Holdbarhet: 24 måneder fra produksjonsdato, 1 måned etter åpning.

Utseende og lukt

Uten fargestoffer og parfyme.

Produksjonsland

STORBRITANNIA

Bruker- og miljø sikkerhet

MDR medisinsk utstyr. For profesjonelt bruk. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på kiilto.no

Emballasjematerialer

Klutenes forpakning er laget av PET/PE plast og sorteres som plastavfall, transportemballasjen sorteres som papp.

Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr.	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)	Type forpakning
12 x 100 stk	5261	5701684526125	5701684526118	Flowpack

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.